
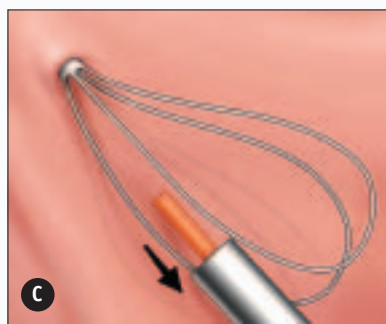
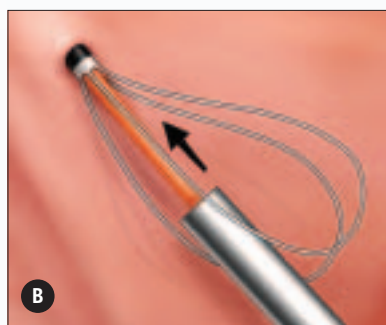
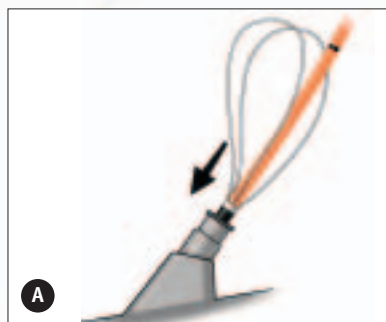


Polaris™ Loop

Техника постановки катетера

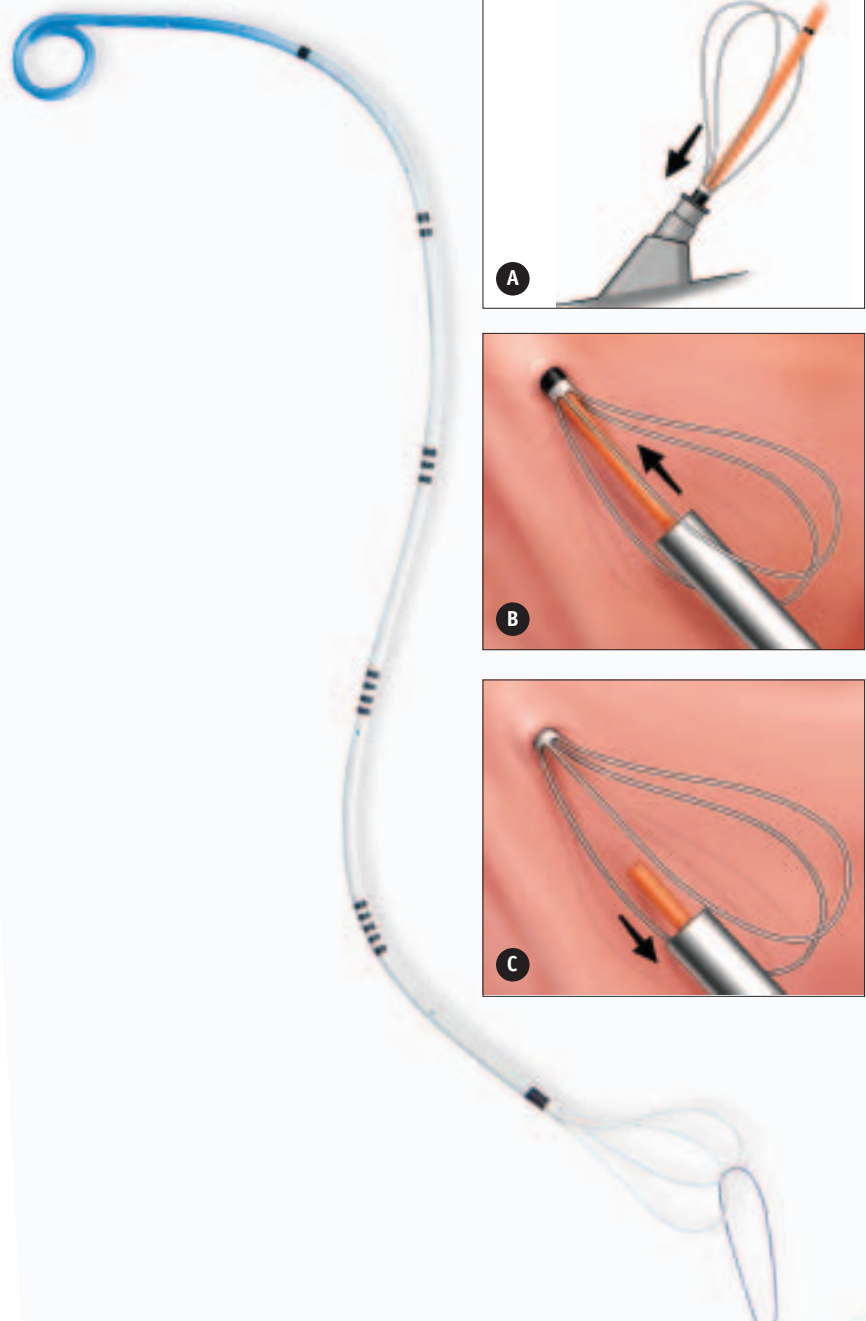

- 1 Для активации покрытия погрузите стент в стерилизованную воду или физиологический раствор как минимум на 30 секунд.
- 2 Загрузите стент по проводнику и продвигайтесь к элементу порта.
- 3 Стент следует продвинуть до точки, где часть стержня находится за пределами элемента порта прицела.
- 4 Продвигайте стент по проводнику, пока позиционер не упрется в стержень стента, а петли не будут лежать над позиционером. (см. иллюстрацию А).
- 5 Пропустите конический наконечник стента по проводнику и через цистоскоп.
- 6 Погружайте держатель Loop по проксимальной части проводника к стенту и продвигайте стент вверх по мочеточнику. (см. Рисунок В).
- 7 Черная маркерная полоска на мочеточниковом стенте, расположенная чуть выше петель мочевого пузыря, должна быть расположена у отверстия мочеточника.
- 8 Медленно извлеките проводник для придания дистальной спирали нужной формы в почечной лоханке. Размещение должно быть проверено методом рентгеноскопии или рентгенографии. (см. Рисунок С).
- 9 Выбирайте стент надлежащего размера в соответствии с анатомией пациента. Правильно подобранный по размеру стент должен быть полностью свернут в спираль внутри почечной лоханки, а петли свободно плавать в мочевом пузыре.
- 10 Если нить для извлечения все еще прикреплена, то ее можно удалить в этот момент. Чтобы удалить нить для извлечения, возьмите узел, обрежьте одну нитку и, удерживая узел, аккуратно потяните за нить для извлечения.

MMG
Medical Marketing Group

Адрес: г. Алматы ул. Луганского 54 В
Телефон +7 (727) 313 12 19

Refer to package insert provided with Polaris Ultra for complete Instructions for Use, including indications for use, contraindications, potential complications, warnings and cautions.

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

**Boston
Scientific**
Delivering what's next.™

Boston Scientific Corporation
One Boston Scientific Place
Natick, MA 01760-1537
www.bostonscientific.com

Ordering Information
1.888.272.1001

© 2007 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

DVU1180 2M 6/07-6/09